



YOUR PROFESSIONAL STAGE & SAFETY EQUIPMENT



Gehoorbescherming op maat

Gebruiksaanwijzing

Producer

Audinc
Torenallee 45
5617 BA, Eindhoven
Nederland

Dealer

Safety Freaks BV
Esp 252
5633 AC Eindhoven
Nederland

Handleiding op maat gemaakte gehoorbescherming

Uw nieuwe op maat gemaakte gehoorbescherming is zo ontworpen om het gehoor te beschermen tegen schadelijke geluiden en lawaai, mits er op een correcte manier gebruik wordt gemaakt van uw op maat gemaakte gehoorbeschermers.

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de gehoorbescherming raden wij u aan om deze handleiding zorgvuldig door te lezen en op te volgen.

Het plaatsen van de op maat gemaakte gehoorbeschermers

De gehoorbeschermers zijn voorzien van een serienummer. Deze zijn rood - of blauw gekleurd. Op deze manier is het makkelijk gemaakt om onderscheid te maken tussen links en rechts. Het **rode** serienummer is voor het rechter oor, en het **blauwe** serienummer voor het linker oor.

1. Houd de gehoorbeschermers vast met uw duim en wijsvinger.

Hierbij is het van belang dat u de gehoorbeschermers zo vasthoudt dat het serienummer naar uw gezicht wijst en de tip van de gehoorbeschermers naar boven is gericht.

2. Plaats de gehoorbeschermers in uw oorschelp. Druk deze vervolgens, voorzichtig in het oor kanaal en draai de gehoorbeschermers tegelijkertijd een kwartslag, tegen de klok in.

Het op deze manier plaatsen zal ervoor zorgen dat deze op de juiste manier in het oor zit. Zorg ervoor dat deze niet te diep in het oor komen te zitten, zodat de gehoorbeschermers op een zo efficiënt mogelijke manier het geluidsniveau kan verminderen. Onjuist gebruik verhoogt tevens de kans op een kortere levensduur van de gehoorbeschermers.

Schoonmaken

Zorg er voor dat de gehoorbeschermers naast het gebruik netjes is opgeborgen in de meegeleverde etui. Daarnaast is het van groot belang dat de gehoorbeschermers zo goed mogelijk wordt schoongemaakt, zodat deze langer mee gaan.

Het schoonmaken met de voor aanschaf beschikbare schoonmaakset zal ervoor zorgen dat de gehoorbeschermers zo lang mogelijk meegaan. Deze gebruiksaanwijzing vindt u op de volgende pagina.

Gebruik


Wij raden het sterk aan om de gehoorbeschermers te gebruiken zodra u zich in een lawaaierige omgeving bevindt. Het is van belang dat de gehoorbeschermers zoals beschreven worden ingebracht, om de levensduur van zowel het gehoor als de gehoorbeschermers te vergroten.

Het laboratorium kan niet aansprakelijk worden gesteld op eventuele schade die zich opdoet met betrekking tot de gehoorbeschermers, als gevolg van onjuist gebruik.


Het is belangrijk dat de gehoorbeschermers worden onderzocht door een audioloog (elke 24 maanden). Dit wordt sterk aangeraden, aangezien schade aan het geluidskanaal van de gehoorbeschermers ervoor kan zorgen dat de afdichting aanzienlijk afneemt. Als er schade aan de gehoorbeschermers(s) mocht worden geconstateerd, dan zullen deze vervangen moeten worden door nieuwe.

Mochten de gehoorbeschermers niet worden onderzocht elke 24 maanden, dan zullen deze na elke vier jaar vervangen moeten worden door nieuwe.

Dit product kan nadelig worden beïnvloed door chemische substanties. Voor meer informatie raden wij u aan om contact met ons op te nemen.

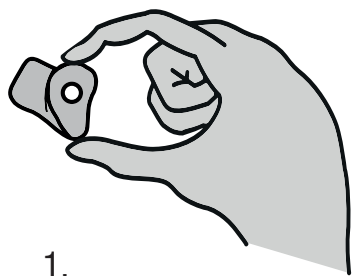

1.

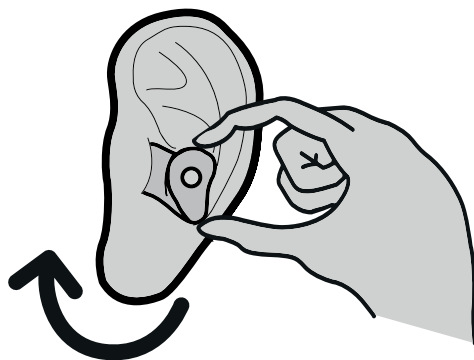


2.

Let op!

Het **rode** serienummer is voor het rechter oor


Het **blauwe** serienummer is voor het linker oor

Silcom cord instructies

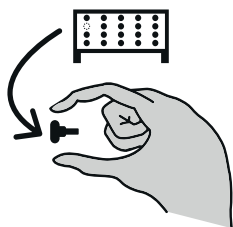

1. Breek twee eindstopjes uit de blister

2. Steek het uiteinde van het koord op de aangegeven manier door de opening van de aanpak

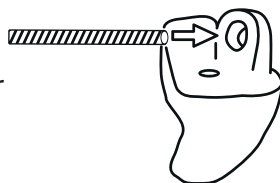

3. Druk het eindstopje in het koord en trek het koord aan totdat deze blokkeert



Het schoonmaken van de gehoorbescherming

Speciaal ontwikkeld voor de verzorging van de gehoorbescherming. Het regelmatig verzorgen zal de levensduur van de gehoorbescherming verlengen.

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de gehoorbescherming raden wij u aan om deze handleiding zorgvuldig door te lezen en op te volgen.

Gebruiksaanwijzing

Spuut een kleine hoeveelheid vloeistof op de gehoorbeschermers. Veeg dit vervolgens met een doekje schoon en droog. Bij hardnekkig vuil raden wij aan een van de reinigingsdoekjes te gebruiken

Om het inwendige kanaal van de gehoorbeschermers droog te maken, maak je gebruik van het blauwe blaasbalgje.

Het gebruik van bruistabletten

1. Neem het mandje uit de reinigingsbeker
2. Leg het reinigingstablet in de beker en vul deze met water
3. Leg de gehoorbeschermers in het mandje en plaats het in de reinigingsbeker
4. Laat de gehoorbeschermers gedurende minimaal 15 minuten (tot eventueel de gehele nacht) in de beker liggen
5. Neem het mandje met de gehoorbeschermers uit de beker en spoel deze af met water
6. Laat de gehoorbeschermers goed drogen

Let op!

Gebruik per reiniging een nieuw tablet

Niet om in te nemen, buiten gebruik van kinderen houden

Let op dat het filter niet uit de behuizing schuift tijdens het gebruik van het blaasbalgje

CE-Certification and norm number

EN 352-2 : 2002 tested by

Aliénor Certification

ZA du Sanital

21 rue Albert Einstein

86100 CHATELLERAULT

notified body number : 2754

Products comply with the EU (2016/425) regulation

The EU declaration of conformity can be found on: <https://audinc.eu/doc>